


## Präanalytik - Wichtige Hinweise für die bestmögliche Qualität

- Jedes Röhrchen mehrmals vorsichtig direkt nach der Blutentnahme schwenken
- Bitte die Röhrchen beschriften, zur eindeutigen Identifizierung!
- Bitte die Röhrchen **nicht zentrifugieren oder kühlen!**
- Bei **Raumtemperatur** und vor Sonnenlicht geschützt lagern.
- Bitte die Röhrchen nur in unseren speziellen Testkits versenden.
- Logistik:

International empfehlen wir unseren Medical Express Service

In Deutschland: Für unsere kooperierenden Ärzte und Therapeuten

sowie Patienten bieten wir eine kostenlose Abholung mit Go-Logistik an.

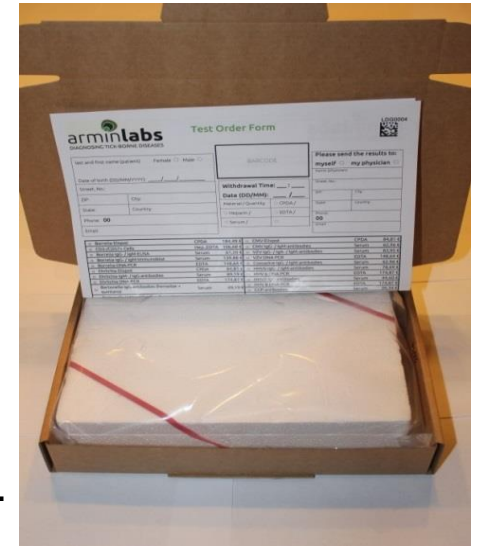

Ihr Befund sollte Ihnen in der Regel, nach Probeneingang mit Standardtestungen, innerhalb von 1 Woche zur Verfügung stehen, mit Fremdleistungen innerhalb von 2-3 Wochen.

Bei Fragen, Beschwerden oder für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!

**Tel.: 0049 821 780 931 50**

**Mail: [info@arminlabs.com](mailto:info@arminlabs.com)**

**Internet: [www.arminlabs.com](http://www.arminlabs.com)**

  
**arminlabs**  
Medicum Bad Aibling MVZ GmbH

Erstellt am: 01.02.2024	Geprüft am: 01.02.2024	Freigegeben am: 06.02.2024
Name: Neugebauer Veronika	Name: Härtl Marina	Name: Neugebauer Veronika
Revision: 1	Revision Datum: 01.02.2024	Änderung: Allg. Überarbeitung

## Blutentnahme-Verwendung der richtigen Röhren:



Antikörper: 1 x Serum Röhren

Stabilität: Bis zu 14 Tage



EliSpot: 3 x ACD/CPDA Röhren

(bitte falls möglich 3 Röhren abnehmen)

Stabilität: Bis zu 3 Tage



CD3-/57+Zellen: 1 x Heparin Röhren + 1 x EDTA Röhren

Stabilität: Bis zu 3 Tage



PCR: 1 x EDTA Röhren

Stabilität: Bis zu 5 Tage