

Preamalytics - Viktig information för bästa möjliga kvalitet

- Snurra försiktigt varje rör flera gånger omedelbart efter blodprovstagningen
- Märk rören för tydlig identifiering!
- Rören får inte **centrifugeras eller kylas!**
- Förvara dem i **rumstemperatur** och skyddade från solljus.
- Skicka endast rören i våra speciella testkit.
- Logistik:

Internationellt rekommenderar vi vår Medical Express Service

I Tyskland: För våra samarbetande läkare och terapeuter samt patienter erbjuder vi kostnadsfri upphämtning med Go-Logistics.



Som regel bör resultaten vara tillgängliga inom 1 vecka efter mottagandet av provet med standardtester och inom 2-3 veckor med tjänster från tredje part. Om du har några frågor, klagomål eller behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta oss!

Tel.: 0049 821 780 931 50

Mail: info@arminlabs.com

Internet: www.arminlabs.com


Medicum Bad Aibling MVZ GmbH

Erstelt am: 01.02.2024	Geprüft am: 01.02.2024	Freigegeben am: 06.02.2024
Name: Neugebauer Veronika	Name: Härtl Marina	Name: Neugebauer Veronika
Revision: 1	Revision Datum: 01.02.2024	Anderung: Allg. Überarbeitung

Blodtagning - Använd rätt rör:



Antikroppar: 1 x serumrör
Stabilitet: Upp till 14 dagar



EliSpot: 3 x ACD/CPDA-rör (ta bort 3 rör om möjligt)
Stabilitet: Upp till 3 dagar



CD3-/57+ celler: 1 x heparinrör + 1 x EDTA-rör
Stabilitet: Upp till 3 dagar



PCR: 1 x EDTA-rör
Stabilitet: Upp till 5 dagar