	Formblatt	FB095	
		17.11.2016	
	Präanalytik deutsch	E	1 von 2

Präanalytik - Wichtige Hinweise für die bestmögliche Qualität

- Jedes Röhrchen mehrmals vorsichtig direkt nach der Blutentnahme schwenken
- Bitte die Röhrchen **nicht zentrifugieren oder kühlen!**
- Bei **Raumtemperatur** und vor Sonnenlicht geschützt lagern.
- Bitte die Röhrchen nur in unseren speziellen Testkits versenden
- Logistik:

International empfehlen wir unseren Medical Express Service


In Deutschland: Für unsere kooperierende Ärzte und Therapeuten

Sowie Patienten bieten wir eine kostenlose Abholung mit Go-Logistik an.



ArminLabs GmbH - Geschäftsführer: Dr. med Armin Schwarzbach, Laborarzt
 Zirbelstraße 58, 2. Stock · 86154 Augsburg · Germany · Tel.: 0049 821 780 931 50 www.arminlabs.com
 Email: info@arminlabs.com · USt-IdNr.: DE815543871 · Amtsgericht Augsburg HRB 29350

Erstellt am: 17.07.2018	Geprüft am: 17.07.2018	Freigegeben am: 17.07.2018
Name: Zeidler, Sigrid	Name: Bail, Sarah	Name: Zeidler, Sigrid

	Formblatt	FB095	
	Präanalytik deutsch	17.11.2016	
		E	1 von 2

Blutentnahme-Verwendung der richtigen Röhrrchen



Antikörper: 1 x Serum Röhrrchen
Stabilität: Bis zu 14 Tage



EliSpot: 3 x ACD/CPDA Röhrrchen
 (bitte falls möglich 3 Röhrrchen abnehmen)
Stabilität: Bis zu 3 Tage



CD3-/57+Zellen: 1 x Heparin Röhrrchen + 1 x EDTA Röhrrchen
Stabilität: Bis zu 3 Tage



PCR: 1 x EDTA Röhrrchen
Stabilität: Bis zu 5 Tage

Erstellt am: 17.07.2018	Geprüft am: 17.07.2018	Freigegeben am: 17.07.2018
Name: Zeidler, Sigrid	Name: Bail, Sarah	Name: Zeidler, Sigrid